




## Schritt 1

Wechseln Sie in der Contour Diabetes App in das Menü **Mein Profil**, von dort in **BERICHTE**

Klicken Sie dort dann auf **ROHDATENDATEI (CSV)**

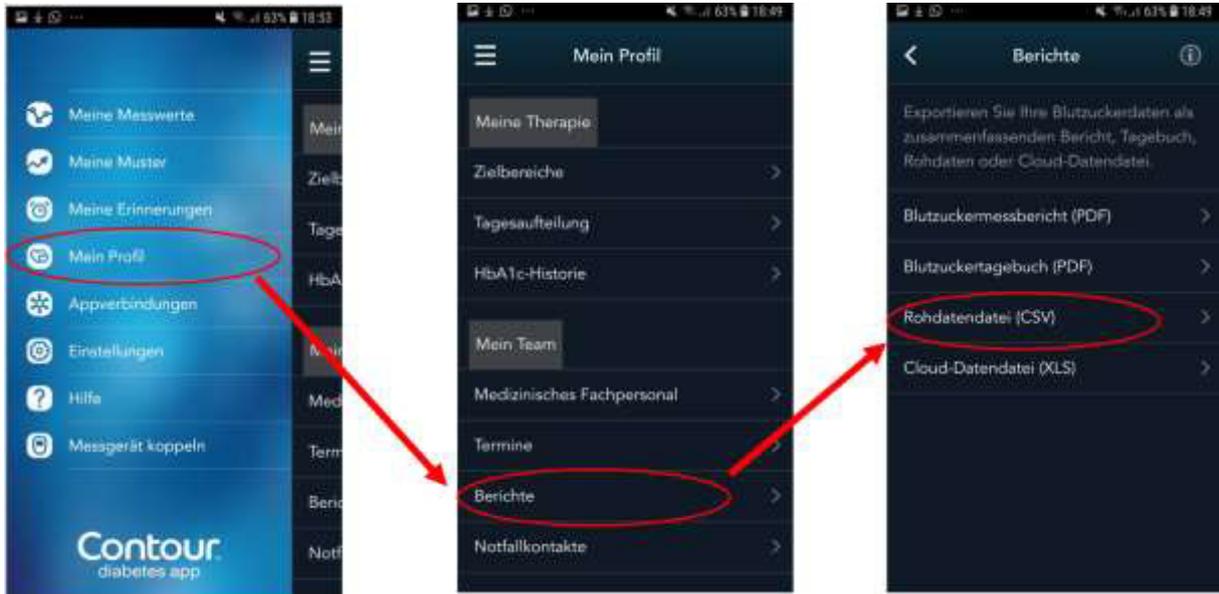


## Schritt 2

Klicken Sie auf das **TEILEN** Symbol am linken unteren Bildschirmrand. .



Wählen Sie in der erscheinenden Liste die App **DIABASS SecureSend** aus

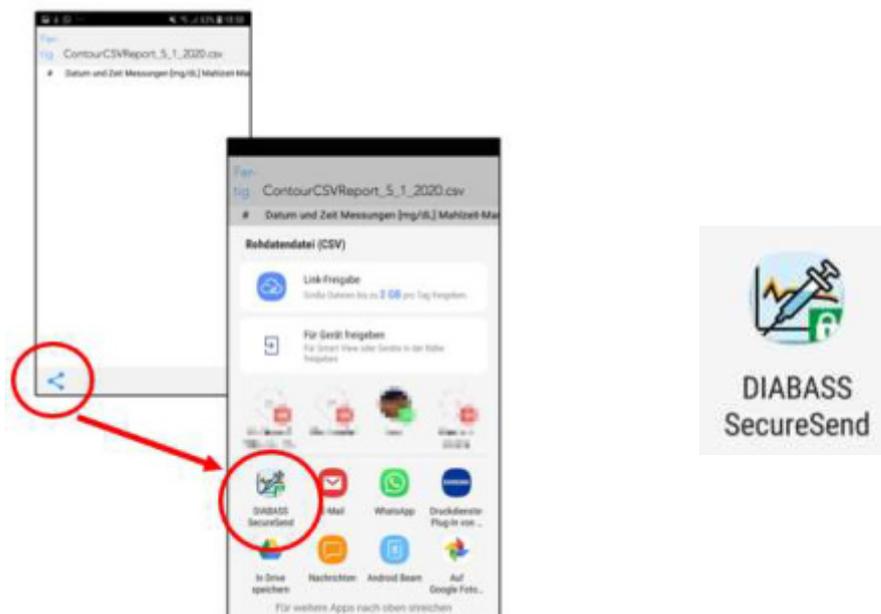




### Schritt 3

Die *DIABASS SecureSend* App startet nun automatisch und zeigt die zu versendende Datei.

Klicken Sie dann auf **WEITER**

### Schritt 4

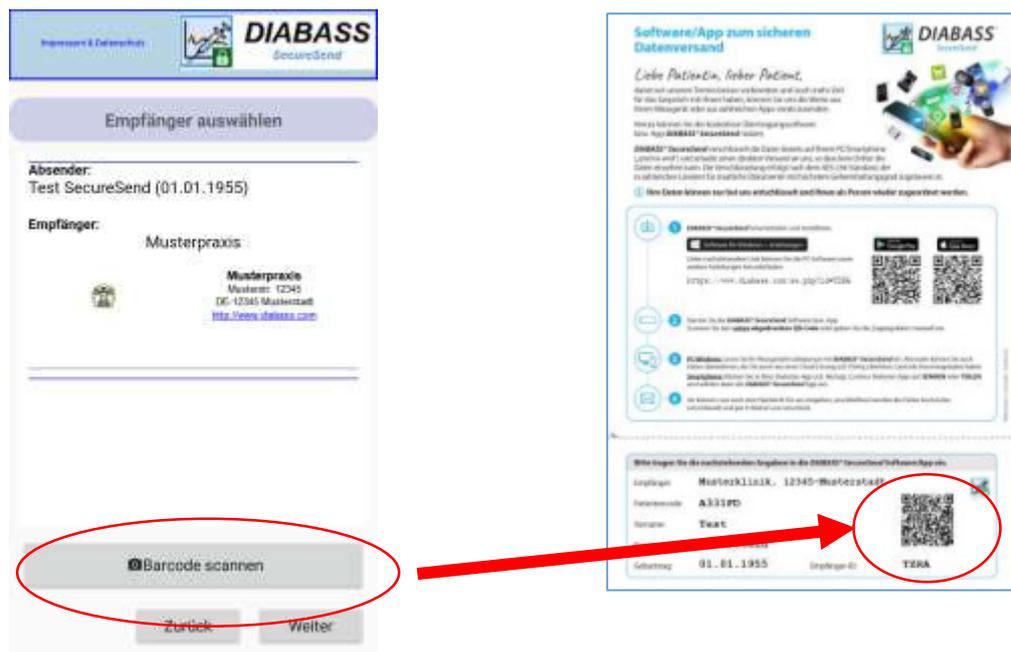

Klicken Sie auf **BARCODE SCANNEN** und scannen den Barcode vom Infoblatt, welches Sie von Ihrer Praxis erhalten haben. Es werden anschließend die Daten des Empfängers angezeigt.

Klicken Sie dann auf **WEITER**

### Schritt 5

Hier können Sie eine (optionale) Nachricht für den Empfänger eingeben.

Klicken Sie dann auf **WEITER**



## Schritt 6

Die Daten sind nun hochsicher verschlüsselt (AES-256) und für die Übermittlung vorbereitet.

Sie können nun wählen, auf welche Weise die Daten verschickt werden sollen.

### Versand über E-Mail App:

Es wird eine Nachricht in Ihrem Standard-Email-App erzeugt, die Nachricht muss anschließend von Ihnen noch manuell versendet werden

### Versand über Server:

Die verschlüsselten Daten werden an den *DIABASS SecureSend*-Server übermittelt. Von dort werden diese dann per E-Mail mit neutralem Absender an den Empfänger weitergeschickt und anschließend wieder gelöscht.

Bestätigen Sie mit **WEITER**

The screenshot shows the 'Übermittlungsmethode wählen' (Choose transfer method) screen in the DIABASS SecureSend app. At the top, there is a header with the text 'Impressum & Datenschutz' and the DIABASS SecureSend logo. Below the header, the text 'Übermittlungsmethode wählen' is displayed in a rounded rectangle. The main content area contains the instruction 'Bitte wählen Sie die Versandart aus' (Please choose the shipping method). There are two radio button options: 'Versand über eMail-App' (selected) and 'Versand über Server'. The 'Versand über eMail-App' option is selected, and its description is 'Es wird eine eMail in der Mail-App erzeugt die Sie dann selbständig verschicken können'. The 'Versand über Server' option is unselected, and its description is 'Die verschlüsselten Daten werden über den Server von DIABASS SecureSend verschickt'. At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Abbruch' (Cancel) and 'Weiter' (Next).