

Die nachstehenden Angaben gelten für folgende Betriebssysteme: Android, iOS



## Um Daten aus der DIAMANT App zu senden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

### Schritt 1

Klicken Sie in der DIAMANT App auf das Menü am oberen Bildschirmrand und wählen dann **BLUTZUCKERWERTE EXPORTIEREN** 



### Schritt 2

Bestätigen Sie den Datenexport und klicken dann auf **EXPORTIEREN**. Anschließend wählen Sie die DIABASS SecureSend App zum Datenversand aus.



### Schritt 3

Die DIABASS SecureSend App startet nun automatisch. Wählen Sie beim ersten Start "ANDERER EMPFÄNGER" und scannen den vom Arzt erhaltenen Barcode.





# **Anleitung: Datenversand aus DIAMANT APP**

Die nachstehenden Angaben gelten für folgende Betriebssysteme: Android, iOS



Schritt 6 Die Daten sind nun hochsicher verschlüsselt (AES-256) und für

Wählen Sie nun die Versandart aus und bestätigen mit WEITER.



### Schritt 4

Klicken Sie auf WEITER. Es werden nun die vom Barcode gelesenen Versanddaten angezeigt. Wenn die Angaben richtig sind, klicken Sie auf **WEITER** 

	A ■ Stall / 1% ■ 21.39
Impressum & Datenschutz	
Vorname und Name	Geburtsdatum
Test SecureSend	01.01.1955
Patientencode	A331FD
2010 0,00000,00020	and the second se

### Schritt 5

Hier können Sie eine (optionale) Nachricht für den Empfänger eingeben. Klicken Sie dann auf WEITER

Mpressum & Datenschutz	1	`* ® ]   DIA	71% 2 ABA	1:59 SS
Nachricht für Empfänger				
Dies ist ein Test				
Zurüc	k	We	iter 🗲	

∎ 🗢 🕒 …	*	¥ 🗟 . 🛙 71% 🛢 22:0	00
mpressum & Datenschutz	12	DIABAS SecureSend	S
Sitte wählen Cie die V			
Sitte wanien Sie die v	ersandar	t aus	
Versand über eMail	I-App		
Es wird eine eMail in der	r Mail-App e	erzeugt, die Sie dann	
selbständig verschicken	i können		
Versand über Serve	er		
Die verschlüsselten Date	en werden i	über den Server von	
DIABASS SecureSend ve	erschickt		
🗶 Zurüc	rk (	Weiter <b>&gt;</b>	٦

die Übermittlung vorbereitet.

### /ersand über E-Mail App:

s wird eine Nachricht in nrem Standard-Email-App rzeugt, die Nachricht muss nschließend von Ihnen noch nanuell versendet werden

### /ersand über Server: ie verschlüsselten Daten verden an den DIABASS ecureSend-Server übermittelt nd von dort per E-Mail mit eutralem Absender an den mpfänger weitergeschickt.