





## Schritt 1

Wählen Sie in der *GlucoMen Day* App den Befehl „INFO“ und klicken dort auf **CSV-Datenimport**.

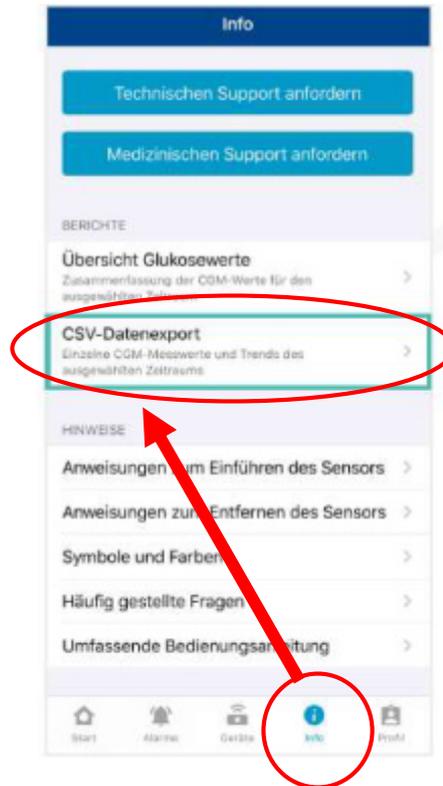

## Schritt 2

Anschließend wählen Sie den gewünschten Zeitraum und **BERICHT ERSTELLEN**

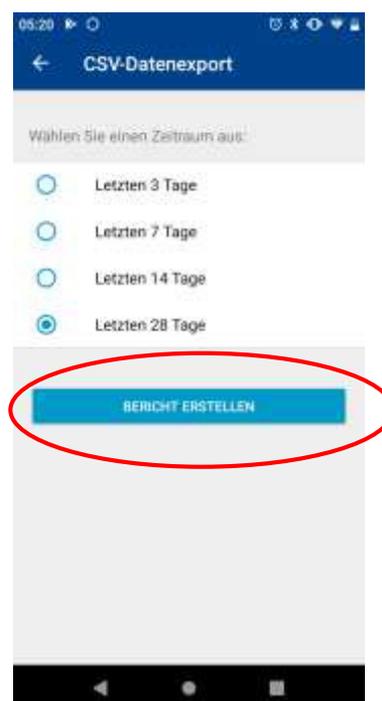




### Schritt 3

Klicken Sie auf das **TEILEN** Symbol am rechten unteren Bildschirmrand.



Wählen Sie in der erscheinenden Liste die App **DIABASS SecureSend** aus

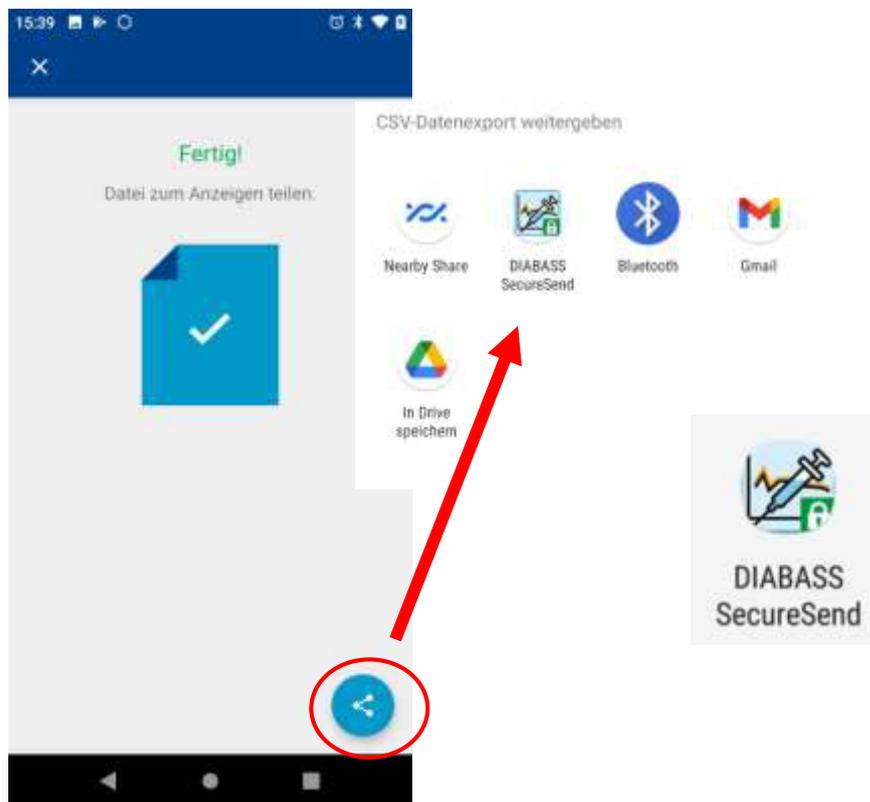


### Schritt 4

Die *DIABASS SecureSend* App startet nun automatisch und zeigt die zu versendende Datei.

Klicken Sie dann auf **WEITER**



## Schritt 5

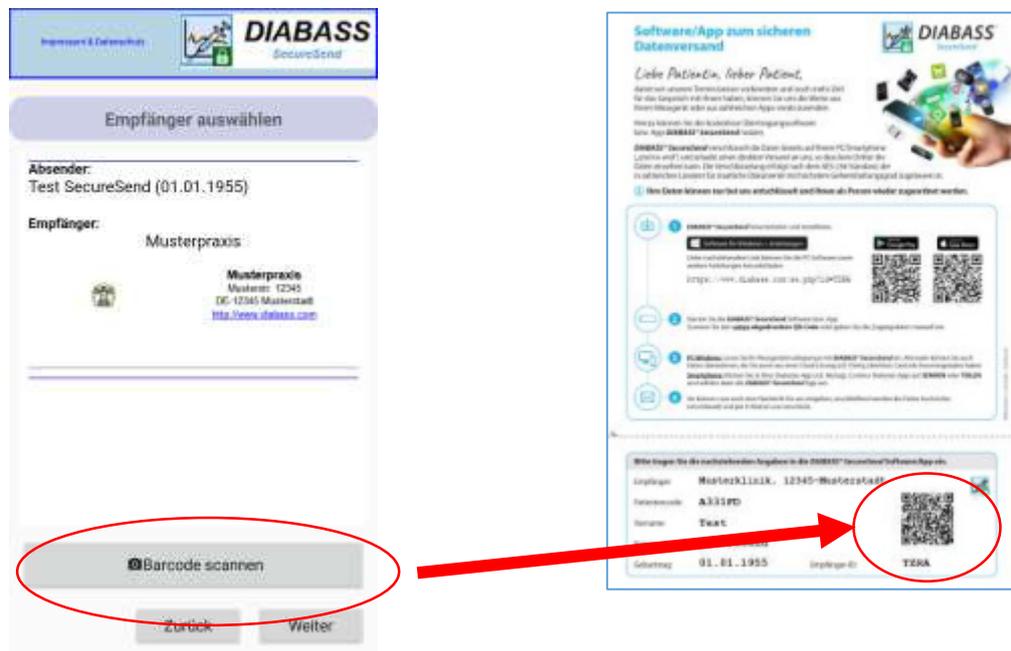

Klicken Sie auf **BARCODE SCANNEN** und scannen den Barcode vom Infoblatt, welches Sie von Ihrer Praxis erhalten haben. Es werden anschließend die Daten des Empfängers angezeigt.

Klicken Sie dann auf **WEITER**

## Schritt 6

Hier können Sie eine (optionale) Nachricht für den Empfänger eingeben.

Klicken Sie dann auf **WEITER**



## Schritt 7

Die Daten sind nun hochsicher verschlüsselt (AES-256) und für die Übermittlung vorbereitet.

Sie können nun wählen, auf welche Weise die Daten verschickt werden sollen.

### Versand über E-Mail App:

Es wird eine Nachricht in Ihrem Standard-Email-App erzeugt, die Nachricht muss anschließend von Ihnen noch manuell versendet werden

### Versand über Server:

Die verschlüsselten Daten werden an den *DIABASS SecureSend*-Server übermittelt. Von dort werden diese dann per E-Mail mit neutralem Absender an den Empfänger weitergeschickt und anschließend wieder gelöscht.

Bestätigen Sie mit **WEITER**

The screenshot shows the 'Übermittlungsmethode wählen' (Select transmission method) screen. At the top, there is a header with 'Impressum & Datenschutz' and the 'DIABASS SecureSend' logo. Below the header, the text 'Übermittlungsmethode wählen' is displayed. The main content area contains the instruction 'Bitte wählen Sie die Versandart aus' (Please select the shipping method) and two radio button options:

- Versand über eMail-App**  
Es wird eine eMail in der Mail-App erzeugt die Sie dann selbständig verschicken können
- Versand über Server**  
Die verschlüsselten Daten werden über den Server von DIABASS SecureSend verschickt

At the bottom of the screen, there are two buttons: 'Abbruch' (Cancel) and 'Weiter' (Next).