Die nachstehenden Angaben gelten für folgende Betriebssysteme: Windows



Um Daten aus der mylife Software zu übertragen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

#### Schritt 1

Loggen Sie sich in Ihr Konto bei mylife Software ein und wählen dort die Option "**Tagebuch**", diese befindet sich in der linken Menüleiste

Boftware			G :	lucte
ft Destenent	Text CSR, 01.01.75 mythr TpacParip, 10004505		~	Importiece mylife YpsoParep Daten
tagebuth	Trends Hourisheit der BZ-Messung:	2 Wishen 🗸 🧲	таналан эканалан 🗲 💥 і	Tool &
Sincering	Nocht genägend Weite für eine gültige Beurteinung perunden. Durchsicher Anzahl Hypois pro Monat:		?	Importiere mylife OmniPod Daten
	Die deichschriftliche Aszahl Hypos hat sich richt verändert. Standardabweichung:		2	
	Durchsche. Biutzucker Messwert: Nicht genägend Histe für eine pülige Beuteilung pelunden.		?	
				Bistzacker-Daten
Here I was million theory out Down Totand	tan Tondonia ame Transfelia a Societa			

### Schritt 2

Wählen Sie zuerst den gewünschten Zeitbereich aus und anschließend **CSV** im Menü "**Berichte**"

X Software										Q, Suche
Oxfload	2 Woo	0911,01 het ∨ <	01.75	0 - 28.01.28 > >>	Filter V	. Des	tit 🗸 Ereignis 🗸		Dateneingabe 🗸	
Obersicht	110	Oversee	Uhrzeit	Ereignis	Wert	E Way			Notiz	
Tagebuch >	Di.	28.01.20	05:10	<b>A</b> Butracher	5,8	n ON				Î
Standardiag	Di.	28.01.20	06:10	Table registeres or	45	g KH		1		
Vertekung	M0.	27.01.20	23.99	Ba Dolas	15,99	U		1		
realizes:N	Mo.	27.01.20	11.54	O THEREAR	6.7	rensil.				
Trendbericht	M0.	27.01.20	11:54	Kontenhydrate	50	g KH				
Pumpenenstellungen	MD.	27.01.20	08.05	Katherbucker	6,1	FIFICIA.				
Personliche Daten	MD.	21.01.20	06.06	•	*0	g Kn	Bolasvorschiag	9		
Einstellungen							Mahizeittolus: 7,5 U Bolusvorschlag: 7,5 U Berechnungsparameter			
Perufatihan@uch		17.04.00		a. 886	7.60		Eingegebener BZ: 6.1 mmoil, BZ-Zielwert 6 mmoil, Komekkurbikkor: 2			
Datenfreigabe	-			m.			Insulin: OU Annass. akt.	9		
Uter	Noti	DEMC								
Lagad										

#### Schritt 3

Es wird nun eine Rohdatendatei im Format CSV erzeugt, bitte speichern Sie diese dann in einem Ordner auf Ihrer Festplatte

w		Q, Suche
Software	Speichem anter X	
Dairtourd	Organisionen w Nituer Ordener 🔤 w 🌒	
Obersett	) # Schedorg# Exwarden keine Sochergebrisse pelanden. Netz	
Tagetoon 🔰	)  Debie	
Standarding	2 ■ 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10	
Verbolung	2 Dokument	
Visionexent	> 4 Downlada > 2 Mark	
Treadberk.tt	biotare lipitation	
Purpesenstellungen	Banga Mount Los Cir One (200)	_
Personiche Daten	A Other subleden	
Einsleitungen	Mahavitoka 7.5.4 Rohavenchog 7.5.4 Revolvenceparamilar	
Benutzerhandbach	Erceptension 22, 61, 1 mmoil, 82/201est 6 mmoil, Karrektarbitter 2	
Datentregate	Insult: 0 U Antonia di	
Über	Nofaen:	
Logout	Weinschlen Seine Tagebachzer (M. Kil) verfahren? Citiven Speichem Albertelles X	

# Schritt 4

In DIABASS SecureSend wählen Sie den Tabellenreiter **Apps/Software** und dort **mylife Software** 

ID eingeben Empfängerin	fo Daten einlesen Nachricht	Versenden
aten einlesen te wählen Sie die Datenquelle aus und klic	ken dann auf WEITER'	
Ale Blutzuckermessgeräte CGM/F	GM Insulnpumpen Apps/Software Blutdruckme	essgeräte Andere Geräte
Suchen:		
Name	A Hersteller	Info
OneTouch Reveal App	LifeScan	
Sidary	Sinovo	
Withings Body Scale	Withings	
18G*Star App	Sanofi Aventis	
Fora HM	ForaCare	
ଟ mySugr	mySugr	
mylife CSV	YPSOMED	
A vDrin	SUSSESSOUT/SUPPORT	

# Schritt 5

Klicken Sie anschließend auf **SUCHEN** und wählen die aus der mylife Software gespeicherte CSV-Datei aus

