


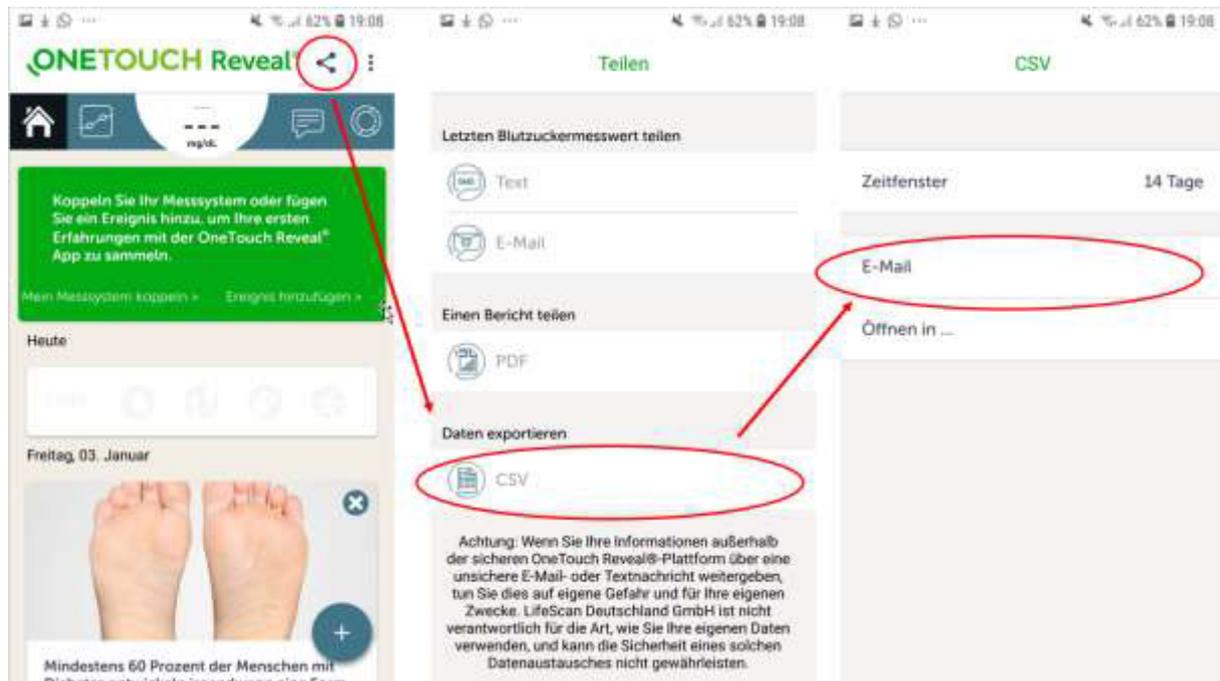

Schritt 1



Klicken Sie in der OneTouch Reveal App auf das **TEILEN**-Symbol am oberen Bildschirmrand.

Wählen Sie anschließend **DATEN EXPORTIEREN (CSV)** und klicken Sie dann auf **E-MAIL**



Schritt 2

Wählen Sie in der erscheinenden Liste die App **DIABASS SecureSend** aus

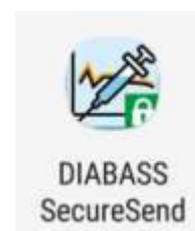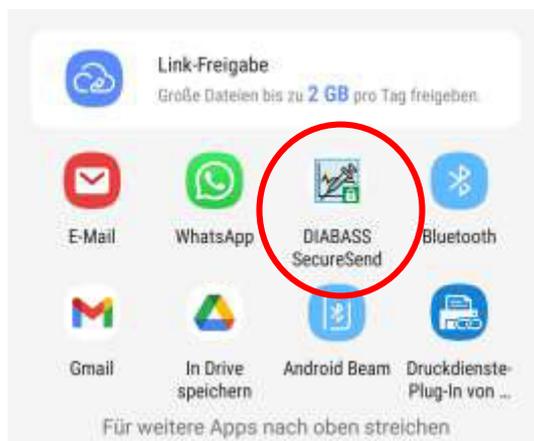




Schritt 3

Die *DIABASS SecureSend* App startet nun automatisch und zeigt die zu versendende Datei.

Klicken Sie dann auf **WEITER**

Schritt 4

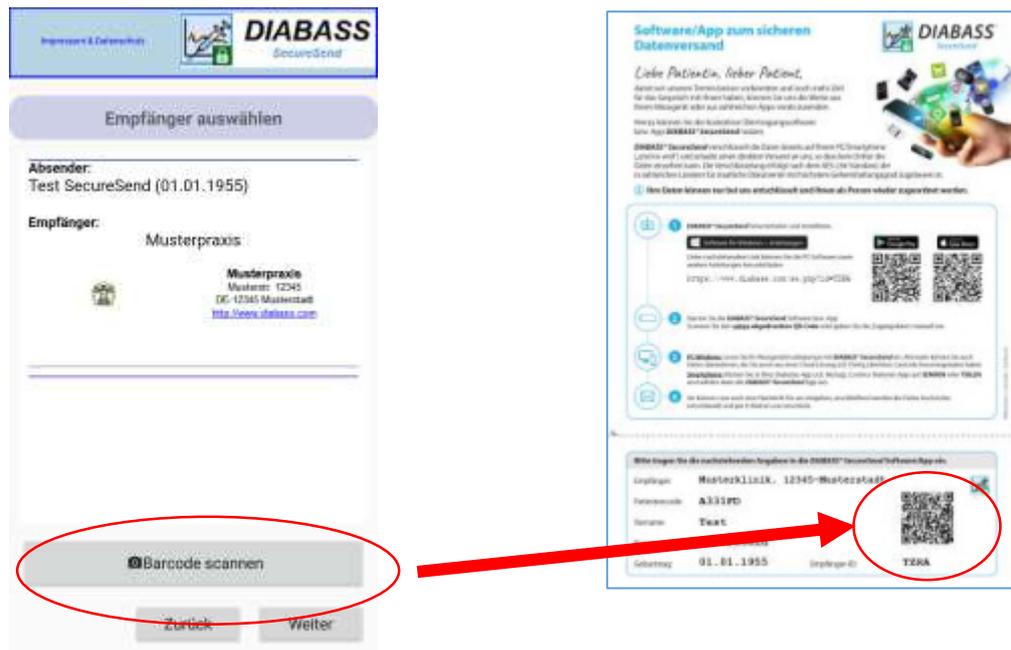

Klicken Sie auf **BARCODE SCANNEN** und scannen den Barcode vom Infoblatt, welches Sie von Ihrer Praxis erhalten haben. Es werden anschließend die Daten des Empfängers angezeigt.

Klicken Sie dann auf **WEITER**

Schritt 5

Hier können Sie eine (optionale) Nachricht für den Empfänger eingeben.

Klicken Sie dann auf **WEITER**



Schritt 6

Die Daten sind nun hochsicher verschlüsselt (AES-256) und für die Übermittlung vorbereitet.

Sie können nun wählen, auf welche Weise die Daten verschickt werden sollen.

Versand über E-Mail App:

Es wird eine Nachricht in Ihrem Standard-Email-App erzeugt, die Nachricht muss anschließend von Ihnen noch manuell versendet werden

Versand über Server:

Die verschlüsselten Daten werden an den *DIABASS SecureSend*-Server übermittelt. Von dort werden diese dann per E-Mail mit neutralem Absender an den Empfänger weitergeschickt und anschließend wieder gelöscht.

Bestätigen Sie mit **WEITER**

Impressum & Datenschutz **DIABASS** SecureSend

Übermittlungsmethode wählen

Bitte wählen Sie die Versandart aus

Versand über eMail-App
Es wird eine eMail in der Mail-App erzeugt die Sie dann selbständig verschicken können

Versand über Server
Die verschlüsselten Daten werden über den Server von DIABASS SecureSend verschickt

Abbruch Weiter